

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DA SAÚDE Serviço de Enfermagem	Procedimento Operacional Padrão Nº 03
TÍTULO: Limpeza e desinfecção de caixa térmica de poliuretano			
Emitido por: Vide colaboradores	Analisado por: Daniela Rodrigues de Camargo	Aprovado por: Alessandra Salmeron Ramos	
Emitido em: Dezembro 2019	Validado em: Janeiro 2020	Revisão em: Junho 2023	
Objetivo: Proporcionar ambiente térmico livre de agentes patogênicos.			

Definição

Limpeza e desinfecção de caixa térmica.

Profissionais envolvidos

Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de enfermagem.

Materiais necessários

- EPI (avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas de autoproteção);
- 01 esponja macia de limpeza;
- 01 escova de mamadeira;
- Solução de água e detergente;
- Panos limpos e secos;
- Balde ou bacia com tampa;
- Hipoclorito de sódio a 1%.

PROCEDIMENTO

- Proceder limpeza concorrente da pia e bancada com água e sabão e finalizar com álcool antes e após o procedimento;
- Lavar a caixa térmica com fricção de água e sabão (usar bucha e escova) área interna/externa e tampa;
- Enxaguar em água corrente;
- Secar;
- Preencher a caixa com hipoclorito a 1% e deixar por 30 minutos;

- Enxaguar em água corrente;
- Secar;
- Finalizar com fricção de pano embebido em álcool;
- Encaminhar a Caixa Térmica para a sala destino;
- Guardá-las abertas em local ventilado;
- Verificar com frequência as condições da caixa, observando se existem rachaduras e/ou furos.

Referências

Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar (APECIH). Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em serviços de saúde. 1ª ed. São Paulo: 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 15 de 15/03/2012 ANVISA - Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências. Brasília, 2012.

Portaria nº 3214 de 08/06/78 – Dispõe sobre segurança no trabalho. NR 32 Norma Regulamentadora – Segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de assistência à saúde.

Prefeitura Municipal de Sorocaba. Protocolo. Centro de Material de Esterilização. Sorocaba, 2012.

SOBECC – Práticas Recomendadas – Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material Esterilizado – 5ª Edição revisada e atualizada.

Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de imunização – 5ª edição – Brasília DF 2017 – Ministério da Saúde.