

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA SECRETARIA DA SAÚDE Serviço de Enfermagem	Procedimento Operacional Padrão Nº 58
TÍTULO: Teste do laringoscópio e lâminas			
Emitido por: Vide colaboradores	Analisado por: Fabiana Campos de Almeida Miranda	Aprovado por: Fabiana dos Santos Baptista e Lígia Regina da Costa	
Emitido em: Dezembro 2019	Validado em: Janeiro 2020	Revisão em: Junho 2023	
Objetivo: Verificar o funcionamento do laringoscópio (Instrumento endoscópico, que contém um sistema óptico, introduzido pela cavidade oral, para visualização da laringe).			

Definição

Realizar teste do laringoscópio diariamente com a finalidade de prevenir eventos adversos durante a assistência, garantir o bom funcionamento do mesmo sempre que necessário e, assim, contribuir para a segurança do paciente.

Profissionais envolvidos

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

Materiais necessários

- Planilha de conferência com listagem dos materiais e medicamentos do carro de emergência (**Check list para material de urgência – Anexo 2**);
- Planilha de conferência diária da sala de emergência (**Check list diário sala de emergência – Anexo 2**);
- Lâminas:
 - Adulto – Reta e curva: Nº 2, 3 e 4;
 - Infantil – Reta e curva: Nº 0, 1 e 2;
- Luvas;
- Cabo do laringoscópio;
- 02 Pilhas médias (adulto);
- 02 Pilhas AA (pediátrico).

PROCEDIMENTO

- Higienizar as mãos conforme POP nº01;
- Colocar luvas de procedimento;

- Verificar a presença de duas peças do laringoscópio (lâminas e cabos);
- Certificar o correto posicionamento das pilhas no compartimento do cabo do laringoscópio;
- Encaixar firmemente a lâmina do laringoscópio ao cabo;
- Conectar cada lâmina ao cabo e deixando-a “aberta”;
- Certificar-se de que a luz que está na lâmina acenda ao encaixá-la no cabo;
- Observar a intensidade da luz emitida pela lâmpada da lâmina, a mesma deve ser de forte intensidade;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos novamente;
- Registrar na planilha de controle (**check list diário sala emergência – anexo 2**) com data, a hora e assinatura do responsável pelo teste. Se conferência mensal, utilizar a Planilha de conferência com listagem dos materiais e medicamentos do carro de emergência (**Check list para material de urgência – Anexo 2**);
- Após realizar o teste, acondicionar as pilhas no estojo ou caixa do laringoscópio. Guardar o laringoscópio e as lâminas protegidos em saco plástico ou filme transparente, datado com validade de 7 dias. Manter em local de fácil acesso;
- Deixar sempre um par de pilhas novas dentro do carrinho de emergência (Pilhas AA e média);
- Manter o ambiente em ordem;
- Repetir o procedimento todo dia ao início do turno.



http://www2.ebserh.gov.br/documents/17082/374045/POP_ENFERMAGEM.pdf/41341424-745e-45fb-8baa-ea9541523f39

Durante o teste de funcionamento do laringoscópio, se a luz não acender ou estiver fraca, confira o contato e/ou troque as pilhas do cabo, se o problema persistir, encaminhe-o para conserto e providencie a sua troca.

Observar se a lâmina se acopla corretamente ao cabo e se mantém acoplada na posição correta, se o problema persistir, encaminhe-o para conserto e providencie a sua troca.

Referências

SMELTZER SC, BARE BG. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012, vol I e II.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2ª ed, 2016.

Limpeza do Laringoscópio. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/saude/vigilancia-em-saude-e-seguranca-do-paciente/scih-servico-de-controle-de-infeccao-hospitalar/POP.SIH.013LimpezadoLaringoscpio.pdf>. Acesso em: 18/05/2023.

Parecer Cofen-SP N°024/2018. Carro de Emergência. Conferência. Vistoria. Reposição. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/parecer-no-024-2018-cofen-ctas_67673.html. Acesso em 30/06/2023.

Parecer Coren-SP N°010/2022. Carro de Emergência: Responsabilidade pela composição, montagem, conferência e reposição de materiais. Disponível em: https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/07/Parecer_010_2022-Carro-de-emergencia.pdf. Acesso em 10/05/2023.